

Novinka

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ally®

Partner stomika pro každý den

Stomické příslušenství



Ally® Stomické příslušenství

Každá postava je jiná. Stejně jako každá stomie. Řada příslušenství Ally® je navržena tak, aby umožnila ještě individuálnější péči o stomie.


Ruku v ruce se stomickým sáčkem mohou výrobky Ally® pomoci bezpečně držet stomický sáček na svém místě, omezit problémy s podtékáním a přispět k lepšímu fungování stomie, chránit a pečovat o okolní kůži.

Ally® - váš partner pro každý den






- 4 Ally® Stomické těsnicí kroužky
Těsnicí vyrovnávací ochranný kroužek

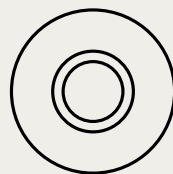

- 6 Ally® Vyrovnávací pásy
Elastické pásy pro stomiky

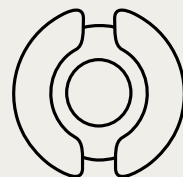

- 8 Ally® Stomická pasta
Ochranná bariérová pasta
bez alkoholu



- 10 Ally® Stomický pudr
Pudr pro stomiky





Ally® Stomické těsnicí kroužky

Těsnicí vyrovnávací kroužek

Ally® Stomické těsnicí kroužky jsou navrženy tak, aby chránily před podtékáním a zároveň chránily kůži. Kroužek tvoří rovnější povrch kolem stomie, pomůže vyplnit prohlubně a kožní záhyby. Těsnicí kroužek lze také jednoduše tvarovat, aplikovat a odstraňovat.

Ally® Stomické těsnicí kroužky se doporučují zejména pro osoby, které mají kožní řasu nebo záhyby kolem stomie. Kroužky jsou také přizpůsobeny pro osoby s horší jemnou motorikou nebo horší obratností rukou.



	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Průměr (mm)	Množství	Katalog. číslo	Kód SÚKL
	Ally® Stomické těsnicí manžety	3	98	10	2022983	5016320
	Těsnicí manžety - limit: 60 ks/měsíc, 03.08.01.05					
	Ally® Stomické těsnicí kroužky	4,5	48	10	2022484	5016319
		3		10	2022483	5016318
	Vkládací kroužky - limit: 60 ks/měsíc; lze předepsat pouze s podložkou nebo jednodílným sáčkem, 03.08.01.01					



Jak používat



Zajistěte, aby kůže v okolí stomie byla čistá a suchá.



Odstraňte ochrannou folii.

Přizpůsobeno pro osoby se sníženou obratností:
Snadno odstranitelná ochranná folie díky ouškům.



Kroužek vytvarujte prsty a roztáhněte na požadovaný tvar.



Nalepte kroužek kolem stomie. Pokud ještě potřebujete upravit tvar kroužku, jemně jej uhladte mokkými prsty. Kroužek pak lépe přilne ke kůži.



Nalepte stomický sáček na kroužek, střed sáčku musí být zarovnan na střed kroužku a dobře přiléhat.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.


Ally® Vyrovnávací pásky

Elastické pásy pro stomiky

Ally® Vyrovnávací pásy pomáhají posílit přilnavost a udržet bezpečně stomickou pomůcku na místě po celou dobu nošení. Jsou navrženy tak, aby kopírovaly kontury těla i při pohybu.

Ally® vyrovnávací pásy jsou zvláště doporučovány pro osoby se stomií, které mají parastomální kýlu, stomie s prolapsem nebo stomie umístěné v neobvyklé poloze.



	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Průměr (mm)	Množství	Katalog. číslo	Kód SÚKL
	Ally® Vyrovnávací pásy			20	2022300	5016322
Pásy vyrovnávací - limit: 120 ks/měsíc; lze předepsat pouze s podložkou nebo jednodílným sáčkem, 03.08.01.02						

Jak používat



Zajistěte, aby kůže v okolí stomie byla čistá a suchá.



Odstraňte polovinu ochranné fólie.



Přiložte vyrovnávací pásek na kůži, přičemž překryjte okraj sáčku. Pásek by měl překrývat okraje sáčku alespoň o půl centimetru.



Odstraňte zbývající část ochranné fólie a uhladte, abyste dopomohli maximálnímu přilnutí.

Stejným způsobem postupujte i na druhé straně sáčku.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.


Ally® Stomická pasta

Ochranná bariérová pasta bez alkoholu

Ally® Stomická pasta je určena k vyplnění záhybů a zvrásnění kůže v okolí stomie, čímž udržuje těsné přilnutí mezi stomií a pomůckou. Pomáhá snižovat podtékání, chrání kůži před střevním obsahem a může pomoci prodloužit dobu nošení.

Ally® Stomická pasta se doporučuje zejména pro osoby s kožními prohlubněmi nebo záhyby v okolí stomie.



	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Průměr (mm)	Množství	Katalog. číslo	Kód SÚKL
	Ally® Ochranná pasta bez alkoholu			1	2022200	5016317
Adhesivní pasty a gely - limit: 1 ks/měsíc, 03.08.01.03						

Jak používat



Zajistěte, aby kůže v okolí stomie byla čistá a suchá.



Aplikujte pastu přímo z tuby na kůži. Může se také nanášet přímo na podložku. Pastu nenanášejte na celou lepicí plochu.



V případě potřeby pastu uhladte navlhčeným prstem nebo lékařskou špachtlí.



Po nalepení sáčku se ujistěte, že podložka dobře přilnula kolem stomie. Jemně zatlačte vašimi prsty kolem celého okolí stomie. Případné zbytky pasty u uzávěru odstraňte čistým kapesníkem a tubu uzavřete, aby nedošlo k vysychání pasty.



Abyste tubu mohli lehce vyprázdnit, doporučujeme použít svorku, která je součástí balení.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.


Ally® Stomický pudr

Pudr pro stomiky

Ally® Stomický pudr je určen k absorpci vlhkosti v okolí stomie, kůže zůstává suchá. Pomáhá kůži chránit, snižuje podráždění a umožňuje lepší přilnutí sáčku. Podporuje hojivé procesy podrážděné kůže.

Ally® Stomický pudr se doporučuje zejména pro osoby se stomií, které mají zarudlou, bolestivou nebo podrážděnou kůži.



	Název výrobku	Tloušťka (mm)	Průměr (mm)	Množství	Katalog. číslo	Kód SÚKL
	Ally® Stomický pudr			1	2022100	5016321
Ochranné prostředky pro pacienty se stomií - zásypové pudry a gely - 870 Kč (bez DPH)/měsíc						

Jak používat



Zajistěte, aby kůže v okolí stomie byla čistá a suchá.



Odšroubujte uzávěr, nasměrujte lahvičku ke kůži, kterou je třeba ošetřit. Jemně lahvičku potřepte a naneste přiměřené množství pudru na kůži v okolí stomie.



Pudr rovnoměrně rozetřete. Můžete použít i suchý kapesník. Před přiložením lepicí plochy podložky, odstraňte přebytečný pudr.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.

Téměř 50 let se aktivně podílíme na péči o stomiky, podporujeme je nabídkou bezpečných a snadno použitelných stomických sáčků a stomickým příslušenstvím. Komplexní stomické portfolio pro každého stomického pacienta je součástí našeho komplexního holistického přístupu.



Ally® Stomické těsnící kroužky určené k vyplnění dutin/záhybů v neporušené kůži kolem stomie, pro použití s kolostomiemi, ileostomiemi, urostomiemi, přičemž může pomoci zabránit úniku a chránit kůži. Zdravotnický prostředek. Výrobce je Zhende Medical Co., Ltd. Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA.

Ally® Vyrovnávací pásy jsou navrženy tak, aby zabránily zvednutí a odchlípnutí okrajů podkladové desky a udržovala podkladovou desku bezpečně na místě po delší dobu nošení. Pro použití s kolostomickými, ileostomickými nebo urostomickými sáčky. Zdravotnický prostředek. Výrobce je Zhende Medical Co., Ltd. Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA.

Ally® Stomická pasta je pohodlná a účinná kožní bariérová pasta určená pro použití při kolostomii, ileostomii a urostomii a lze ji použít k vyplnění prostor způsobených kožními záhyby nebo jinými nepravidlostmi pokožky, aby se snížil únik a chránila se pokožka. Zdravotnický prostředek. Výrobce je Zhende Medical Co., Ltd. Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA.

Ally® Stomický pudr účinně absorbuje vlhkost a udržuje pokožku suchou, pomáhá jí chránit, snižuje podráždění a umožňuje lepší přilnutí stomického sáčku. Pro použití s kolostomiemi, ileostomiemi, urostomiemi. Zdravotnický prostředek. Výrobce je Zhende Medical Co., Ltd. Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA.